

# Mini Remote Microphone

GEBRUIKSAANWIJZING





Overzicht . . . . .	4
Basisfuncties . . . . .	7
Dagelijks gebruik . . . . .	9
Dragen van de Mini Remote Microphone . . . . .	11
Koppelen met hoortoestellen . . . . .	12
Gebruiken van de Mini Remote Microphone. . . . .	14
Audio-streaming starten/stoppen . . . . .	15
Stroomadapter in elkaar zetten. . . . .	16
Problemen oplossen . . . . .	17
Veiligheidsinstructies. . . . .	19
Wettelijke aanwijzingen. . . . .	20

Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone is ontwikkeld om als externe microfoon geluiden direct naar uw 2,4 GHz draadloze hoortoestellen te streamen. In een rumoerige omgeving kan de Mini Remote Mic door een verre spreker worden gedragen zodat het accessoire als luisterhulp fungeert.

**Streaming** – Audio of geluid wordt draadloos vanaf de Mini Remote Mic naar uw hoortoestellen overgedragen.

### **Inhoud van de verpakking**

- Mini Remote Mic
- Stroomadapter
- USB naar microUSB kabel
- Gebruiksaanwijzing

### **Optionele accessoires**

- Veiligheidskoord (artikel #91324-000)



1. Aan/uit-knop
2. Status-LED
3. Microfoons
4. Aansluiting microUSB
5. Clip

## Overzicht

### 1. Aan/uit-knop

- Schakelt de Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone in en uit

### 2. Status-LED

- Weergave van de status van de Mini Remote Mic

LED	STATUS APPARAAT
Uit	Apparaat is uitgeschakeld
Pulseert langzaam groen	Apparaat is ingeschakeld
Pulseert langzaam rood	Batterij bijna leeg
Constant rood	Mogelijk is er een fout opgetreden

### 3. Microfoon

- Vangt tijdens het gebruik de stem van een spreker op

### 4. Aansluiting microUSB

- Voor het opladen via de USB naar microUSB kabel

### 5. Clip

- Voor het bevestigen van de Mini Remote Mic op kleding of aan een veiligheidskoord

**Tip:** Het volume van de stream kan worden aangepast via de Thrive app, Starkey Hearing Technologies Remote, en/of het bedieningselement van het hoortoestel. Bekijk de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel of neem contact op met uw audicien voor meer informatie over de instellingen van uw systeem.

## Basisfuncties

1. Druk voor het inschakelen van de Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone gedurende 3 seconden op de aan/uit-knop en laat de knop weer los wanneer het LED lampje groen oplicht.  
  
1
2. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen ingeschakeld zijn.
  - **Let op:** Voordat u de eerste keer audio kunt streamen, moeten uw hoortoestellen met de Mini Remote Mic worden gekoppeld. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk over **Koppelen met hoortoestellen** op pagina 12.
3. Om audio te streamen:
  - Open de Thrive app en selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Start Streaming'.
  - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 15.
4. Om het volume van de stream te wijzigen, gebruikt u de Thrive app, Starkey Hearing Technologies Remote, en/of het bedieningselement van het hoortoestel.

- Om te stoppen met streamen volgt u deze aanwijzingen:
  - Schakel de Mini Remote Mic uit.
  - Open de Thrive app en selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Stop Streaming'.
  - Raadpleeg voor meer mogelijkheden het hoofdstuk **Audio-streaming starten/stoppen** op pagina 15.*



## Dagelijks gebruik

### Inschakelen

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt en laat de knop weer los wanneer het LED lampje oplicht.



### Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt en laat de knop weer los wanneer het LED lampje dooft.



### Batterij bijna leeg

LED pulseert langzaam rood.  
Er klinkt elke 5 minuten een signaaltoon in de hoortoestellen.




### Batterij opladen

Steek de microUSB stekker van de laadkabel in de microUSB aansluiting op de Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone.



Steek de USB stekker van de laadkabel in de vrouwelijke USB aansluiting op de meegeleverde stroomadapter.

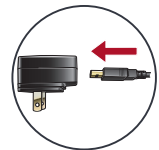

## Oplaad status


De Mini Remote Mic is binnen 3 uur volledig opgeladen. Het duurt ongeveer een uur om het accessoire tot 50% op te laden.

Stand	Oplaad status	LED
Uit	Wordt opgeladen	Constant groen
Uit	Gereed	Uit
Aan	Wordt opgeladen	Constant groen wordt kort onderbroken door andere kleur/ gedrag van status-LED
Aan	Gereed	Uit

**Tip:** Het opladen van de Mini Remote Mic duurt mogelijk langer tijdens het streamen van audio. Het opladen verloopt sneller wanneer de Mini Remote Mic uit staat.

## Dragen van de Mini Remote Microphone

De Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone kan op kleding worden bevestigd of aan een veiligheidskoord worden gedragen. De Mini Remote Mic moet binnen 20 cm van de mond van de spreker worden geplaatst.

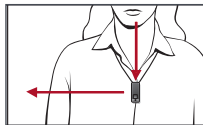


**Clip** – Druk op de clip zoals afgebeeld. Schuif de opening van de clip op het revers van de spreker en laat de clip los. Controleer of de Mini Remote Mic stevig op zijn plek zit.



**Veiligheidskoord (optioneel)** –

1. Druk op de clip zoals afgebeeld.
2. Plaats het lusje van het koord in de opening van de clip en til de lus op richting de bovenkant van de clip. Laat de clip los. Controleer of het veiligheidskoord stevig in de Mini Remote Mic is geplaatst.

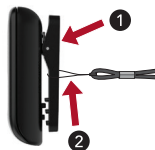

3. Hang het veiligheidskoord om de hals.


## Koppelen met hoortoestellen

Om interactie tussen Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone en uw hoortoestel(len) mogelijk te maken, moet u de Mini Remote Mic eerst met elk hoortoestel koppelen. Deze stap hoeft u slechts één keer uit te voeren, aangezien de apparaten elkaar hierna automatisch herkennen wanneer ze zijn ingeschakeld en zich binnen het draadloze bereik van elkaar bevinden.\*

Om de Mini Remote Mic en uw hoortoestel(len) te koppelen:

1. Zorg ervoor dat uw hoortoestellen niet met andere Bluetooth-apparaten zijn verbonden. Dit doet u door:
  - Bluetooth op uw mobiele telefoon uit te schakelen.
  - Schakel andere accessoires in de buurt uit, bijvoorbeeld Starkey Hearing Technologies TV of Remote Microphone +, indien u deze accessoires eerder met uw hoortoestellen heeft gekoppeld.
2. Schakel uw hoortoestellen uit en schakel ze vervolgens opnieuw in.
  - **Let op:** Voor een systeem met CROS hoortoestellen, moet u zowel het hoortoestel als de CROS zender uitschakelen. Schakel alleen het hoortoestel opnieuw in en zorg ervoor dat de CROS zender uit blijft staan.

- Plaats uw hoortoestellen binnen 15 cm van de Mini Remote Mic.
- Druk twee keer snel op de aan/uit-knop terwijl de groene LED langzaam pulseert. De status-LED zal afwisselend rood en blauw knipperen.

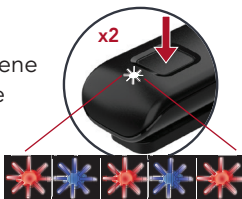

- Voor **een set** hoortoestellen:

Eerste LED knippert	Tweede LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	2	Beide hoortoestellen gekoppeld	Klaar
1	2	Slechts één hoortoestel gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5
1	n.v.t.	Geen hoortoestellen gekoppeld	Herhaal stap 1 – 5

- Voor een **enkel** hoortoestel:

LED knippert	Resultaat koppeling	Volgende stap
1	Gelukt	Klaar
1	Niet gelukt	Herhaal stappen 1 – 4 en 6


*\*Standaard operationeel bereik is maximaal 10 meter. Deze reikwijdte is kleiner in geval van externe factoren zoals versperringen, storende signalen of de positionering van het menselijk lichaam. Het apparaat kan op een grotere afstand worden gebruikt, maar dit leidt mogelijk tot een lagere geluidskwaliteit en zwakkere verbinding.*

## Gebruiken van de Mini Remote Microphone

De Mini Remote Mic is in eerste instantie bedoeld om op afstand door een spreker te worden gedragen in een rumoerige omgeving. Zo kan de hoortoesteldrager zich gemakkelijker op één persoon concentreren wanneer er sprake is van achtergrondgeluid.




Hoewel de Mini Remote Mic niet is geoptimaliseerd voor algemeen gebruik als omnidirectionele tafelmicrofoon, kan hij in bepaalde situaties toch voordelen bieden. Zo kunt u bijvoorbeeld proberen de Mini Remote Mic in de buurt van een televisie te plaatsen. Om een comfortabel luistervolume te bereiken, kunt u de Mini Remote Mic dichterbij of verder van de televisie plaatsen of het volume van de audio stream aanpassen.

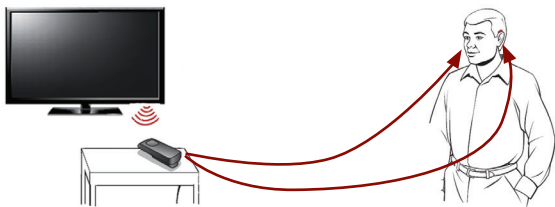

## Audio-streaming starten/stoppen

Het streamen van audio via Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone kan op verschillende manieren worden begonnen of gestopt.

- **Schakel de Mini Remote Mic in:** Audio streamt automatisch naar het hoortoestel.
- **Thrive app:** Open de app op uw mobiele telefoon of tablet. Selecteer vanuit het scherm 'Accessories' de optie 'Start/Stop Streaming'.
- **Starkey Hearing Technologies Remote:** *Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u op de knop 'Favoriet' drukken.* 
- **Bedieningselement hoortoestel:** *Indien uw audicien dit voor u heeft ingesteld, kunt u met een bepaalde handeling (bijv. het lang indrukken van een knop) het streamen starten/stoppen.*


Het streamen van audio stopt ook wanneer de Mini Remote Mic wordt uitgeschakeld.

U hoort een signaaltoon welke aangeeft dat het streamen van audio begint of stopt.

## Stroomadapter in elkaar zetten


Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone kan worden geleverd met een aantal verschillende netstekkers die in diverse landen worden gebruikt.

1. Kies de netstekker die in uw land wordt gebruikt.

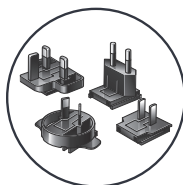


1

2. Schuif de stekker op de stroomadapter tot deze vast klikt.

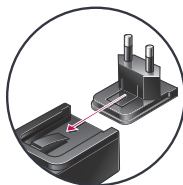

2

3. Om de stekker te verwijderen, drukt u op het lipje en schuift u de stekker van de kabel weg.

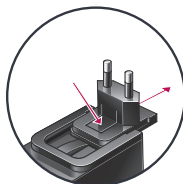

3



## Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Een of beide hoortoestellen houdt onverwachts op met het streamen van audio.	Het hoortoestel bevindt zich mogelijk buiten het draadloze bereik.	Ga dichterbij de Mini Remote Mic zitten.
	Batterij van het hoortoestel is bijna leeg en levert onvoldoende stroom om audio te kunnen streamen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de batterij van het hoortoestel door een nieuwe.</li> <li>• Laad het hoortoestel op indien van toepassing.</li> </ul>
	Grote objecten, zoals meubelstukken of een muur, kunnen het signaal blokkeren.	Voor een optimaal resultaat, dient de ruimte tussen uw hoortoestellen en de Mini Remote Mic vrij te zijn.
	De draadloze verbinding met Mini Remote Mic viel weg.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Audio-streaming starten/stoppen</i> om de audio stream opnieuw te starten.
De geluidskwaliteit van de stream klinkt vervormd.	Batterij van de Mini Remote Mic is bijna leeg.	Laad de Mini Remote Mic op.

Audio stream klinkt te luid of te zacht.	Volume waarop de Mini Remote Mic geluid naar het hoortoestel stuurt, is niet optimaal.	Wijzig het volume van de stream via de Thrive app, Starkey Hearing Technologies Remote, of het bedieningselement van het hoortoestel.
Spreker is moeilijk te verstaan in een rumoerige omgeving.	Mini Remote Mic is mogelijk te ver van de spreker vandaan geplaatst.	Plaats de Mini Remote Mic dichterbij de mond van de spreker.
	Mini Remote Mic wordt mogelijk door kleding afgedekt of is niet optimaal gericht.	Zorg ervoor dat de ruimte tussen de Mini Remote Mic en de stem van de spreker geheel vrij is.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
LED pulseert langzaam groen, maar er is via de hoortoestellen geen geluid hoorbaar.	Hoortoestellen zijn niet gereed voor het ontvangen van een audio stream.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Audio-streaming starten/stoppen</i> om de audio stream te starten.
	Hoortoestellen en Mini Remote Mic zijn niet gekoppeld.	Volg de stappen uit het hoofdstuk <i>Koppelen met hoortoestellen</i> .
LED gloeit constant rood.	Mogelijk is er een fout opgetreden.	Schakel de Mini Remote Mic uit, wacht 30 seconden, schakel het apparaat opnieuw in.

## **Veiligheidsinstructies**

De Starkey Hearing Technologies Mini Remote Microphone is volledig conform Internationale Electromagnetische standaarden ontwikkeld. Ondanks alles bestaat de mogelijkheid van interferentie met hoogspanningsleidingen, metaaldetectoren, electromagnetische velden en andere hulpmiddelen en radiosignalen.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten. Indien u een MRI- of MRT-Behandlung moet ondergaan, raden wij u dringend af de Mini Remote Mic te gebruiken.

## **Gebruik voor in het vliegtuig**

De Mini Remote Mic mag niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan.

## **Internationaal gebruik**

Uw Mini Remote Mic en draadloze overdracht zijn specifiek voor een land waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in de microfoon zelf. De oplaadbare batterij is niet verwisselbaar. Probeer u alstublieft niet de batterij uit te nemen of te verwisselen.

FCC ID: EOA-24RMQ

IC: 6903A-24RMQ (Model 950)

### **FCC Aanwijzing**

Het toestel komt overeen met Deel 15 van de FCCRegulering en met RSS-210. Deze houden de volgende condities in: (1) Het toestel veroorzaakt geen zware interferenties en (2) het toestel moet interferenties afzwakken of beëindigen, ook wanneer dat leidt tot tijdelijke onbruikbaarheid.

**Belangrijk:** De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of TV signalen, die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

De Mini Remote Mic is ontwikkeld onder toezicht van de geldende richtlijnen en correspondeert met de Directive 1999/5/EC. Op onderstaand adres is een kopie van Declaration of Conformity beschikbaar.

Paradigm, Inc.

6600 Washington Ave. South

Eden Prairie, MN USA

Paradigm, Inc. European Headquarters

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park

Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX

United Kingdom









## Fabrikant

Starkey Laboratories  
World Headquarters  
6700 Washington Ave. So.  
Eden Prairie,  
Minnesota MN 55344  
USA

[www.starkey.nl](http://www.starkey.nl)  
[www.starkey.be](http://www.starkey.be)

## Starkey Nederland en België

KIND HOREN  
Laan van de Leeuw 50  
7325 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11  
[info@kindhoren.nl](mailto:info@kindhoren.nl)

