

SURFLINK[®]

MINI MOBILE

GEBRUIKSAANWIJZING



Systeem bevat:
SurfLink Remote Microphone 2 en SurfLink Mini Mobile Adapter

Belangrijk: SurfLink Mini Mobile Adapter is alleen compatibel met de SurfLink Remote Microphone 2.

Inleiding	4
Basisgebruik	6-11
SurfLink externe Microphone	6
SurfLink Mini Mobile	8
SurfLink externe Microphone	
Overzicht van de bedieningselementen	12-13
Werking	14-23
Zwakke batterij en opladen	14
Aan- en uitschuif	16
Synchroniseren met hoortoestellen	17
Ingebouwde microfoon	19
LED indicator	20
Hoe wordt de SurfLink Microphone gedragen?	21
Overdracht van audiosignalen	22
Samenwerking met ander accessoires	23
SurfLink Mini Mobile	
Overzicht regelaars	24-25
Werking	26-33
Zwakke batterij en opladen	26
Multifunctionele drukknop	27
In- en uitschakelen	27
Bluetooth Pairing	27
Telefoongesprekken voeren	29
Luisteren naar muziek	30
Resetten	30
LED	31
Gebruikskenmerken	32
Problemen oplossen	34-37
SurfLink Microphone	34
SurfLink Mini Mobile	36
Wettelijke aanwijzingen	38-45

Inleiding

Het **SurfLink Mini Mobile** systeem bestaat uit twee componenten, de SurfLink Microphone en de SurfLink Mini Mobile Adapter. Voordat u er gebruik van maakt moeten beide producten apart worden ingesteld. De SurfLink Microphone moet worden gesynchroniseerd met uw hoortoestellen. De SurfLink Mini Mobile Adapter moet gekoppeld worden met het Bluetooth apparaat.

De **SurfLink Microphone** is ontworpen om audio via de microfoon rechtstreeks naar uw 900 MHz draadloze hoortoestellen te streamen. Wanneer deze in rumoerige omgevingen gedragen wordt door een spreker op afstand, functioneert de SurfLink Microphone als een hulpmiddel.

Wanneer de **SurfLink Mini Mobile Adapter** aangesloten is aan de SurfLink Microphone, dan is het SurfLink Mini Mobile systeem ontworpen om audio te streamen van het Bluetooth apparaat naar uw 900MHz draadloze hoortoestellen.

Streaming – Audio of spraakgeluiden worden overgedragen (gestreamd) van de SurfLink Microphone naar uw 900MHz draadloze hoortoestellen.


Inhoud van de verpakking

- SurfLink Microphone
- SurfLink Mini Mobile Adapter
- USB naar MicroUSB oplaadkabel
- Adapter voor wandcontactdozen
- Gebruiksaanwijzing

Optionele accessoires

- Oplader voor de auto
- Nekkoord


Vaak voorkomende situatie

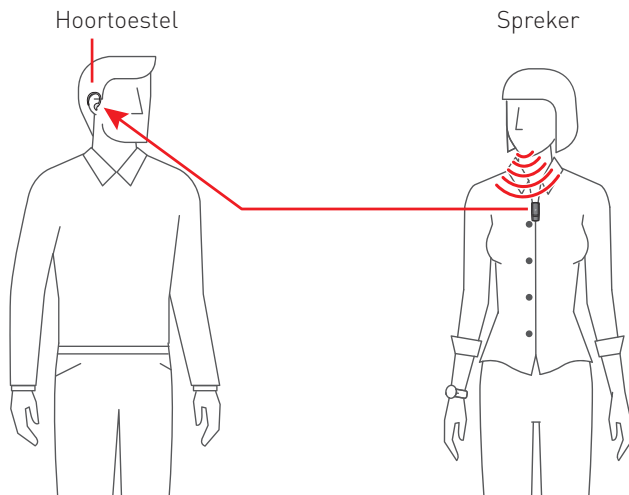

Surflink Remote Microphone Gebruiksaanwijzing


Voor het snel kunnen gebruiken van de Surflink Microphone:

1. Schakel de Surflink Microphone in. Het groen LED lampje knippert 2 seconden.
2. Druk ongeveer 5 seconden op het "Sync" symbool op de schuif totdat deze blauw gaat knipperen.
3. Open de batterij lade van het hoortoestel, plaats er een batterij in en sluit de batterij lade. Het groene lampje knippert ter bevestiging dat de synchronisatie is gelukt.

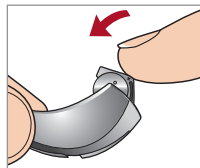

Als u slechts een hoortoestel heeft, wacht u dan 20 seconden totdat het LED lampje rood knippert.


Bij twee hoortoestellen opent u de batterij lade van het tweede toestel, plaats er een batterij in en sluit de batterij lade weer. Het groene LED lampje knippert ter bevestiging dat de synchronisatie is gelukt.

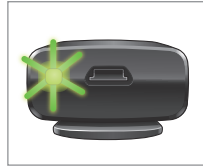

4. Elk toestel zal automatisch beginnen met de Audio streaming. Het blauwe LED lampje knippert langzaam wanneer de audio streaming actief is.



5. Vraag de spreker de SurfLink Microphone op een afstand van 20 cm van zijn mond aan de kleding te bevestigen.

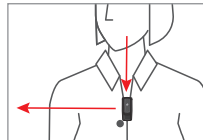

6. Schakel de Microphone uit om het streamen te beëindigen.



SurfLink Mini Mobile Gebruiksaanwijzing

Voor het snel kunnen gebruiken van de SurfLink Mini Mobile:


1. Zorg ervoor dat dat de SurfLink Microphone op de juiste wijze gekoppeld is met uw hoortoestellen en controleer of deze is ingeschakeld.
2. Steek de mannelijke USB jack van de SurfLink Mini Mobile Adapter in de vrouwelijke micro USB jack van de SurfLink Microphone.
3. Druk 2 seconden op de drukknop van de SurfLink Mini Mobile Adapter om deze in te schakelen. Laat de knop los als het groene lampje gaat branden.



4. Zet het Bluetooth apparaat in de pairing modus.

Opmerking: Sommige apparaten vragen naar de pincode van de SurfLink Mini Mobile Adapter. Deze is 0000.

5. Druk twee keer op de drukknop wanneer het groene lampje langzaam knippert. Het LED lampje gaat dan snel blauw knipperen de SurfLink Mini Mobile Adapter wordt in de pairing modus gezet.
6. Selecteer "SurfLink Mini Mobile" op het Bluetooth apparaat om het pairing proces te voltooien.

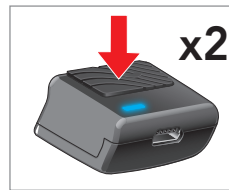

7. Ter bevestiging dat de Bluetooth pairing succesvol verlopen is brandt een groen LED lampje.




8. Ter controle checkt u of het LED lampje langzaam blauw knippert en:
- Speel muziek op het Bluetooth apparaat af.
 - Laat iemand naar het Bluetooth apparaat bellen.
 - Als u het inkomend gesprek in uw hoortoestellen hoort, dan drukt u kort op de drukknop van de SurfLink Mini Mobile Adapter.
 - Spreek in de SurfLink Mini Mobile Adapter Microphone.
 - Druk kort op de drukknop om het gesprek te beëindigen.

9. Druk 2 seconden op de drukknop om de SurfLink Mini Mobile Adapter uit te schakelen. Een rood LED lampje knippert kort ter bevestiging.



Overzicht van de bedieningselementen

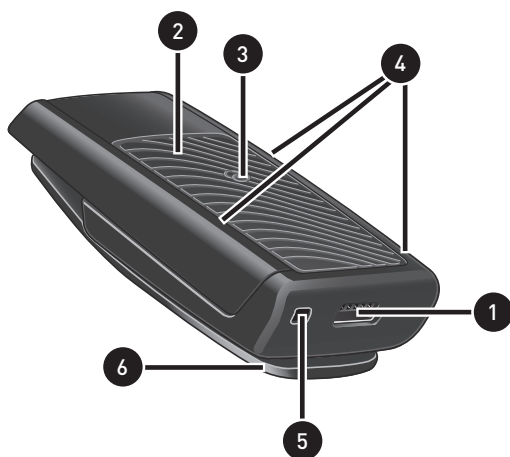

Surf Link externe microfoon

1. Micro USB aansluiting voor het opladen

Opladen met de batterij oplaadkabel.

2. AAN/UIT Schuif

- Beweeg de schuif naar de Micro USB aansluiting toe en de SurfLink Microphone wordt ingeschakeld.
- Beweeg de schuif van de Micro USB aansluiting af en de SurfLink Microphone wordt ingeschakeld.

3. Synchroniseren

Maakt de verbinding tussen de SurfLink Microphone en de hoortoestellen

4. Ingebouwde microfoon

Neemt het geluid op en brengt deze over naar de hoortoestellen.

5. LED-indicator/lampje

Geeft de status weer van de SurfLink Microphone.

6. Clip

Hiermee bevestigt u de SurfLink Microphone aan de kleding, nekkoord etc.

Zwakke batterij en opladen


Wanneer de SurfLink Microphone ingeschakeld is en aangeeft dat de batterij zwak is, dan knippert het rode LED lampje en het toestel geeft een waarschuwingston aan het hoortoestel. Deze toon klinkt aanzienlijk anders dan de waarschuwingston als de batterij zwak is van het hoortoestel, om zo misverstanden te voorkomen. Als de batterij van de SurfLink Microphone zwak is, dan hoort u de overeenkomstige waarschuwingston elke 5 minuten totdat de SurfLink Microphone automatisch wordt uitgeschakeld en aan de oplader wordt gelegd.

Wanneer de SurfLink Microphone op de juiste manier verbonden is met de stroombron dan verandert het LED lampje voor een paar seconden in groen. Deze blijft constant groen branden als het opgeladen is. Wanneer de SurfLink Microphone ingeschakeld is, dan geeft deze de prioriteit aan het streamen en zal het LED lampje langzaam blauw knipperen (zelfs wanneer de batterij vol zit).


Aanwijzing: Het laden van de SurfLink microfoon kan tijdens het streamen langer duren en het gaat sneller wanneer deze is uitgeschakeld.

Normale oplaadmethode

Om op te laden steekt u het uiteinde van de micro USB oplaadkabel in de micro USB aansluiting van de SurfLink Microphone.

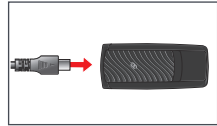


Steek het USB uiteinde van de oplaadkabel in een USB aansluiting, bijvoorbeeld in een computer of oplader van de auto.

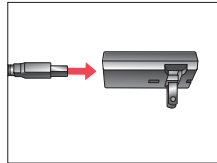

Oplader voor de auto


De SurfLink Microphone kan met een oplaadadapter voor de sigarettenaansteker in de auto worden opgeladen. Deze adapter kunt u in de meeste elektronica-winkels kopen of vraag ernaar bij uw audicien.

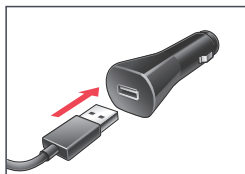

AAN/UIT schuif

Inschakelen

Voor het inschakelen beweegt u de schuif naar de micro USB aansluiting toe. Het LED lampje knippert 2 seconden groen ter bevestiging dat het apparaat aan staat.

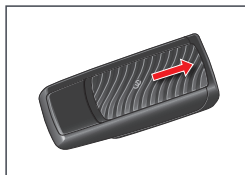

Uitschakelen


Om het streamen te beëindigen beweegt u de schuif van de micro USB aansluiting af totdat het gekleurde gedeelte van het oppervlak zichtbaar is. Het LED lampje knippert 2 seconden rood ter bevestiging dat het apparaat uit staat.



Synchroniseren

Door synchronisatie maakt u een verbinding tussen uw hoortoestellen en de SurfLink Microphone. Om de hoortoestellen een gestreamd audiosignaal te kunnen laten ontvangen, moet u ze eerst met de SurfLink Microphone synchroniseren. U hoeft dit slechts éénmaal te doen omdat uw hoortoestellen daarna automatisch verbinding zoeken wanneer ze zich binnen het bereik van de microphone bevinden.

Als de SurfLink Microphone met de synchronisatie begint, dan drukt u 5 seconden op het "sync"-symbool op de aan/uit schuif totdat het LED lampje snel blauw gaat knipperen.

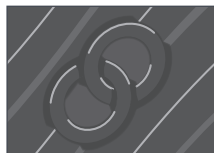

Om een hoortoestel met de SurfLink Microphone te synchroniseren opent u de batterij lade van het hoortoestel, plaatst u er een batterij in en sluit u de batterij lade.

De SurfLink Microphone zorgt voor een actieve synchronisatie die 20 seconden duurt (herkenbaar aan het knipperende rode LED lampje) totdat een hoortoestel ermee gesynchroniseerd is (dit wordt bevestigd met een groen knipperend LED lampje).

Werking

Na een succesvolle synchronisatie van het hoortoestel blijft de SurfLink Microphone nog eens 20 seconden in een actieve synchronisatiestatus (herkenbaar aan het rode knipperende LED lampje) totdat ook het tweede hoortoestel gesynchroniseerd is (bevestigd door het groene knipperende LED lampje).

Na een succesvolle synchronisatie zal elk hoortoestel automatisch met de audio streaming beginnen. Is dat niet het geval, dan herhaalt u de procedure van de synchronisatie.

Om de synchronisatie modus te stoppen schakelt u de SurfLink Microphone uit en zet u deze daarna weer aan.


De SurfLink Microphone kan niet gelijktijdig met het linker hoortoestel en rechter hoortoestel gesynchroniseerd worden.

Dit moet een voor een gebeuren. Wanneer hoortoestellen met een SurfLink Microphone gesynchroniseerd zijn, worden alle eerder gesynchroniseerde apparaten verwijderd.


Ingebouwde microfoon

Afhankelijk van de richting van de SurfLink Microphone in de ruimte kiest deze automatisch voor de microfooninstelling Focus (directioneel) of "Surround" (omnidirectioneel).

„Focus” – Wanneer de SurfLink Microphone om de nek wordt gedragen, dan kiest deze automatisch het van boven komende geluid en vermindert gelijktijdig geluid van andere richtingen. Dit gebruikt u bijvoorbeeld om in een rumoerige omgeving een spreker op afstand te verstaan.

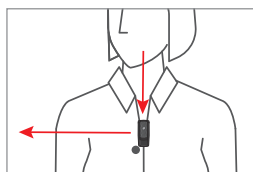

„Surround” – Wanneer de SurfLink Microphone horizontaal geplaatst wordt (op de clip), dan ontvangt deze geluiden van alle richtingen. Deze instelling gebruikt u om meerdere sprekers in de buurt in een rustige omgeving te verstaan.

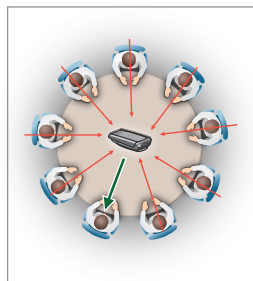

Aanwijzing: Plaats in rumoerige omgevingen de SurfLink Microphone zo dicht als mogelijk bij de geluidsbron.

LED

Het LED display levert nuttige informatie op over de SurfLink Microphone:

LED Display	Status Microphone
Uit	<ul style="list-style-type: none">• SurfLink Microphone staat uit en is niet verbonden• Batterij in SurfLink Microphone werkt niet en moet worden opgeladen
Groen - Constant	<ul style="list-style-type: none">• Batterij is vol en SurfLink Microphone is uitgeschakeld
Groen voor 2 seconden	<ul style="list-style-type: none">• SurfLink Microphone is succesvol ingeschakeld• Oplaadproces is gestart
Rood - langzaam knipperend	<ul style="list-style-type: none">• Batterij is zwak en SurfLink Microphone is ingeschakeld
Rood voor 2 seconden	<ul style="list-style-type: none">• SurfLink Microphone schakelt uit
Rood - snel knipperend	<ul style="list-style-type: none">• Mogelijk is er een defect. Kijk verder bij probleemoplossing.
Blauw - langzaam knipperend	<ul style="list-style-type: none">• SurfLink Microphone draagt audiosignalen over
Blauw - snel knipperend	<ul style="list-style-type: none">• SurfLink Microphone is bezig met synchronisatie

Hoe wordt de SurfLink Microphone gedragen?


U kunt de SurfLink Microphone aan de kleding bevestigen of aan een nekkoord. Voor een betere overdracht moet de SurfLink Microphone op een afstand van 20 cm van de mond van de spreker hangen.

Clip – Druk licht op de knip, zoals u kunt zien op de afbeelding. Schuif de opening van de clip over de kleding en laat deze los. Let er wel op dat de SurfLink Microphone goed aan de kleding vast zit.



Nekkoord (optioneel) –

1. Druk licht op de clip, zoals u kunt zien op de afbeelding.
2. Leg de lus van het nekkoord in de opening van de clip en trek deze naar boven. Let er op dat het nekkoord goed aan de SurfLink Microphone is bevestigd.

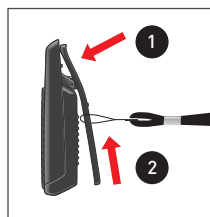

U kunt de nekkoord verkrijgen bij uw audicien.

Aanwijzing: Om een betere signaal-ruis verhouding te hebben kan uw audicien de microfoon van uw hoortoestellen speciaal voor het gebruik van de SurfLink externe microfoon instellen [standby of dempen].

Audio overdracht

Na het inschakelen van de SurfLink Microphone begint deze automatisch met het audio streamen naar de gesynchroniseerde hoortoestellen. Het LED lampje knippert langzaam blauw ter bevestiging dat het audio streamen actief is en de batterij van de SurfLink Microphone functioneert. Wanneer u de SurfLink Microphone uitschakelt stopt het audio streamen automatisch.

De gebruiker kan het niveau van het gestreamde signaal instellen. De SurfLink Microphone beschikt niet over een geïntegreerde volumeregelaar.

Aanwijzing: Plaats de SurfLink Microphone dicht bij de televisie. Om een zo comfortabel mogelijk geluid te krijgen verplaats de SurfLink Microphone op afstand van de televisie boxen of wijzig het volume niveau van de televisie.


Samenwerking met andere accessoires

Wanneer u ook een SurfLink Mobile gebruikt, heeft een telefoongesprek voorrang boven de audio overdracht van de SurfLink Microphone. Is het telefoongesprek met de SurfLink Mobile beëindigd, dan wordt de audio overdracht van de SurfLink Microphone naar de hoortoestellen automatisch voortgezet

De audiosignalen van de SurfLink Microphone en van de SurfLink Media worden gelijk behandeld. Het eerst beschikbare signaal wordt gekozen.

Wanneer u ook een SurfLink Remote of de SurfLink Mobile gebruikt worden de opdrachten achter elkaar naar uw hoortoestellen gezonden.

Overzicht regelaar

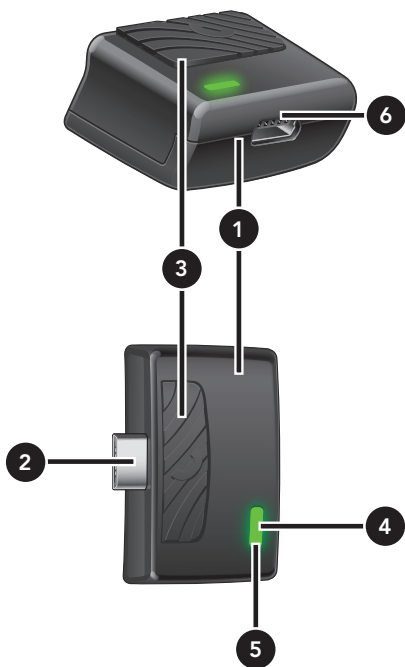

SurfLink Mini Mobile

1. SurfLink Mini Mobile Bluetooth Adapter

2. Micro USB Jack mannelijk

Koppelt de SurfLink Mini Mobile Adapter met de SurfLink Microphone

3. Multifunctionele Druknop

Maakt de bediening van diverse functies van de SurfLink Mini Mobile Adapter mogelijk.

5. LED indicator/lampje

Geeft informatie over de status van de SurfLink Mini Mobile Adapter

4. Ingebouwde microfoon

Neemt de stem op en zendt deze naar de beller tijdens telefoongesprekken.

6. Micro USB vrouwelijk

Zorgt voor het opladen via de batterij oplader.


Zwakke batterij en opladen

Wanneer de SurfLink Mini Mobile Adapter is ingeschakeld en een zwakke batterij status aangeeft, dan knippert het LED lampje rood totdat deze automatisch wordt uitgeschakeld of totdat er een stroombron is aangesloten.

Wanneer de Mini Mobile Adapter is aangesloten op een stroombron, dan knippert het LED lampje constant op groen en het opladen start automatisch. Wanneer deze is ingeschakeld, dan wordt het groene LED lampje onderbroken door andere LED gedragingen. Wanneer de batterij vol is, dan gaat het groene constante LED lampje uit.


Normale oplaadmethode

Om op te laden steekt u het uiteinde van de micro USB oplaadkabel in de micro USB aansluiting (vrouwelijk) van de SurfLink Mini Mobile Adapter.

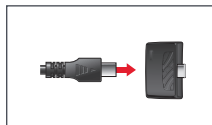

Steek het USB uiteinde van de oplaadkabel in een USB aansluiting, bijvoorbeeld in een computer of oplader van de auto.

U kunt zowel de SurfLink Mini Mobile Adapter en de SurfLink Microphone tegelijk opladen als ze gekoppeld zijn. Terwijl u aan het opladen bent kunt u gewoon audio streamen.

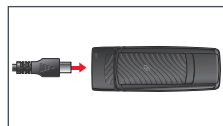

Multifunctionele drukknop

In- en uitschakelen

Inschakelen - Druk 2 seconden op de drukknop als deze is uitgeschakeld. Het LED lampje gaat groen branden, om aan te geven is ingeschakeld.

Uitschakelen - Druk 2 seconden op de drukknop om deze uit te schakelen. Het LED lampje gaat rood branden, om aan te geven dat is uitgeschakeld.

Bluetooth koppeling/Pairing

Voordat u gestreamde audio kan ontvangen op uw SurfLink Mini Mobile Adapter moet deze eerst worden gekoppeld met het Bluetooth apparaat. Zet het Bluetooth apparaat in de pairing modus. Als u niet bekend bent met het Bluetooth pairing proces, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth apparaat. Controleer of de SurfLink Mini Mobile Adapter ingeschakeld is en in een actieve Bluetooth pairing modus is en niet gekoppeld is met andere Bluetooth apparaten (het groene LED lampje knippert langzaam). Druk twee keer op de drukknop zodat het LED lampje snel blauw gaat knipperen. De Mini Mobile Adapter blijft 60 seconden in een actieve Bluetooth modus. Selecteer het product, als deze verschijnt in het Bluetooth apparaat (SurfLink Mini). Ter bevestiging brandt een groen LED lampje dat aangeeft dat de pairing succesvol is.

Een rood snel knipperend lampje geeft aan dat de pairing niet succesvol is. Druk 2 seconden op de drukknop om de pairing modus op de Mini Mobile Adapter te annuleren, waardoor de Mini Mobile Adapter wordt uitgeschakeld. U hoeft de SurfLink Mini Mobile Adapter maar een keer met uw telefoon te paren, dan worden deze automatisch gekoppeld via Bluetooth wanneer ze ingeschakeld en in bereik van elkaar zijn. De Mini Mobile Adapter kan tegelijk gepaird en verbonden zijn met maximaal twee toestellen.

Bluetooth overzicht:

Bluetooth is een draadloze communicatie technologie die gebruikt wordt om data en audio te zenden. Om te kunnen samenwerken met de SurfLink Mini Mobile, moet het bluetooth apparaat over een van de onderstaande profielen beschikken:

- Om telefoongesprekken te plegen/ontvangen moet uw Bluetooth apparaat over het "Hands-Free"(HFP) profiel beschikken
- Om naar muziek te luisteren, moet uw Bluetooth apparaat over het "Media"(A2DP) profiel beschikken.

Om Bluetooth communicatie in te schakelen, moeten de volgend processen voltooid zijn:

Koppelen/Pairing – zorgt voor het tot stand brengen van de koppeling van het Bluetooth apparaat en de SurfLink Mini Mobile Adapter.

Verbinding – Zorgt voor de mogelijkheid om actief audio te streamen van het Bluetooth apparaat naar uw hoortoestellen via de SurfLink Mini Mobile Adapter.

Telefoongesprekken voeren

De SurfLink Mini Mobile Adapter maakt het mogelijk om telefoongesprekken aan te nemen, af te wijzen, te beëindigen en door te schakelen naar of van een Bluetooth gekoppelde telefoon.

Aannemen – Als u een inkomend gesprek in uw hoortoe-stellen hoort, dan drukt u kort op de drukknop van de Mini Mobile adapter.

Afwijzen – Als u een inkomend gesprek in uw hoortoe-stellen hoort, dan drukt u langer dan 2 seconden op de drukknop. Laat de drukknop los als de telefoon niet meer overgaat.

Beëindigen – Tijdens een actief telefoongesprek, drukt u kort op de drukknop van de Mini Mobile adapter.

Doorschakelen – Tijdens een actief telefoongesprek, drukt u langer dan 2 seconden op de drukknop om het gesprek te verplaatsen van de Mini Mobile adapter naar de telefoon. Dit geeft u de mogelijkheid om desgewenst meteen het gesprek van de telefoon op te nemen. Druk opnieuw langer dan 2 seconden op de drukknop om het gesprek terug te verplaatsen naar de Mini Mobile Adapter. Tijdens een actief telefoongesprek, pakt de Mini Mobile Adapter uw spraak op zodat de beller het gesprek hoort tijdens de conversatie. Plaats de Mini Mobile Adapter in een drukke omgeving dicht bij uw mond.

Luisteren naar muziek of andere gestreamde audio

Speel de audio af op uw Bluetooth gekoppelde apparaat om muziek of andere audio te ontvangen in uw hoortoestellen, deze wordt gestreamd via de SurfLink Mini Mobile. Het is niet nodig om op de drukknop te drukken van de SurfLink Mini Mobile Adapter.

Resetten

Om de SurfLink Mini Mobile Adapter terug te zetten naar fabrieksinstellingen zorgt u ervoor dat deze ingeschakeld is en niet verbonden is met andere Bluetooth apparaten (het groene lampje knippert langzaam). Druk twee keer op de drukknop totdat het LED lampje snel blauw gaat knipperen. Druk 12 seconden op de drukknop totdat het LED lampje snel rood begint te knipperen.

De Mini Mobile zal automatisch worden uitschakeld, gevolgd door een reset.

LED

Het LED display levert nuttige informatie over de SurfLink Mini Mobile Adapter:

LED Display	SurfLink Mini Mobile Adapter
Uit	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter is uitgeschakeld en is niet aangesloten aan een stroombron. • Als de Mini Mobile Adapter uitgeschakeld is en niet aangesloten is aan een stroombron, dan is de batterij vol.
Groen - langzaam knipperend	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter is ingeschakeld, maar niet gekoppeld met een Bluetooth apparaat.
Groen voor 2 seconden	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter is succesvol ingeschakeld. • Mini mobile adapter is succesvol gepaard met een Bluetooth apparaat.
Groen - Constant	<ul style="list-style-type: none"> • Laad op en is uitgeschakeld. • Wanneer de Mini Mobile adapter aan het opladen is en ingeschakeld is, dan zal het groene lampje kort door andere LED gedragingen onderbroken worden.
Rood - langzaam knipperend	<ul style="list-style-type: none"> • Zwakke batterij status en de Mini Mobile adapter is ingeschakeld.
Rood voor 2 seconden	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter schakelt uit.
Rood - snel knipperend	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een fout opgetreden met het pairen met een Bluetooth apparaat. • Terugzetten naar fabrieksinstellingen.
Blauw - langzaam knipperend	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter probeert te pairen met een Bluetooth apparaat.
Blauw - snel knipperend	<ul style="list-style-type: none"> • Mini Mobile adapter is gereed voor de koppeling met een Bluetooth apparaat

Veel voorkomende situaties

Om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de SurfLink Mini Mobile adapter, kan deze het beste binnen een voor u gemakkelijk, bereik aanwezig zijn, zodat u eventueel direct op de drukknop kunt drukken om telefoongesprekken aan te nemen en in de ingebouwde microfoon kunt spreken.

Veel voorkomende situaties zijn:

Situatie
Stream audio/spraak van de SurfLink Microphone van een spreker op afstand.
Stream een actief telefoongesprek.
Stream muziek of andere audio.
De gewenste hoortoestelmicrofoons zijn actief en maken het mogelijk dat inkomende telefoongesprekken kunnen worden gevoerd.

Optimale configuratie

De spreker op afstand draagt de ingeschakelde SurfLink Microphone.
of:

De spreker op afstand draagt de SurfLink Microphone (is ingeschakeld)
aangesloten aan de SurfLink Mini Mobile adapter (deze is uitgeschakeld).

SurfLink Microphone is aangesloten aan de SurfLink Mini Mobile adapter
en beiden zijn ingeschakeld.

- Druk op de drukknop van de Mini Mobile adapter om telefoongesprekken aan te nemen.

SurfLink Microphone is aangesloten aan de SurfLink Mini Mobile adapter
en beiden zijn ingeschakeld.

- Start de audio op het Bluetooth apparaat.

SurfLink Microphone is aangesloten aan de SurfLink mini Mobile adapter
en beide zijn ingeschakeld.

- Er is geen actieve streaming van de mobiele telefoon.

Problemen oplossen

SurfLink Microphone

Symptoom/Situatie	Mogelijke oorzaak
Bij een (of beide) hoortoestellen valt plotseling de audiostreaming uit.	Hoortoestel zit waarschijnlijk buiten of op de rand van het streamingsbereik.
	Batterijniveau van het hoortoestel is niet meer afdoende voor de audiostreaming.
	Er is een groot object aanwezig, zoals meubels of een muur die het signaal blokkeren.
	Software van het hoortoestel moet worden geüpdatet.
LED lampje knippert langzaam blauw, maar er worden geen gestreamde geluiden in de hoortoestellen gehoord.	Hoortoestellen zijn niet binnen het streamingsbereik.
	Hoortoestellen zijn niet juist gesynchroniseerd met de SurfLink Microphone.
	Batterijniveau van het hoortoestel is niet meer afdoende voor de audiostreaming.
LED lampje knippert snel rood.	Waarschijnlijk een foutmelding.
Niet goed kunnen verstaan van de spreker in rumoerige omgevingen.	SurfLink Microphone is waarschijnlijk te ver van de spreker verwijderd.
	SurfLink Microphone is waarschijnlijk niet in de goede positie voor optimale streaming.
	Prestatie van de signaal-ruis verhouding is niet optimaal voor het huidige hoortoestel programma.

Mogelijke oplossing

Kom dichterbij de SurfLink Microphone.

Vervang de hoortoestelbatterij voor een nieuwe.

Voor de beste prestatie moeten uw hoortoestellen in het zicht zijn van de SurfLink Microphone.

De audiciens kan de hoortoestellen updaten naar de meest recente firmware.

Kom dichterbij de SurfLink Microphone.

Synchroniseer hoortoestellen met de SurfLink Microphone.

Vervang hoortoestelbatterij voor een nieuwe.

Schakel de SurfLink Microphone uit, wacht dan 15 seconden en schakel de SurfLink Microphone dan weer in.

Plaats de SurfLink Microphone dichterbij de mond van de spreker.

Verplaats de SurfLink Microphone iets naar links of rechts.

Uw audiciens kan het programma optimaliseren die u kunt gebruiken met de SurfLink Microphone.

Problemen oplossen

SurfLink Mini Mobile

Symptoom/situatie	Mogelijke oorzaak
Het gestreamde audio geluid is te luid of te zacht in de hoortoestellen.	Bluetooth apparaat streamt niet op een optimaal volume.
LED lampje knippert langzaam blauw, maar de gestreamde audio wordt niet in de hoortoestellen gehoord.	SurfLink Mini Mobile adapter is waarschijnlijk niet aangesloten aan de SurfLink Microphone.
	SurfLink Microphone is waarschijnlijk niet ingeschakeld.
De beller kan uw stem niet horen tijdens een telefoongesprek.	SurfLink Mini Mobile is waarschijnlijk te ver van uw mond.
De gestreamde Bluetooth audio kwaliteit is niet constant.	Bluetooth apparaat is waarschijnlijk op de rand van het streamingsbereik.
	Batterijniveau van de SurfLink Mini Mobile adapter wordt minder.
	Er is waarschijnlijk een groot object, zoals een lichaam of een muur die het signaal blokkeert.
Smartphone alarmen worden niet altijd gehoord.	Alarmduur is te kort.
Het is niet mogelijk te pairen met meer dan een Bluetooth apparaat.	SurfLink Mini Mobile adapter is waarschijnlijk al actief in een andere Bluetooth verbinding.

Mogelijke oplossing

Pas het volume aan op het Bluetooth apparaat.

Controleer of de Mini Mobile adapter op de juiste wijze zit aangesloten aan de Microphone.

Schakel de SurfLink Microphone in.

Plaats de SurfLink Microphone dichterbij de mond.

Plaats het Bluetooth apparaat dichterbij de SurfLink Mini Mobile.

Laad de Mini Mobile adapter op.

Voor de beste prestatie moet de SurfLink Mini Mobile in het zicht zijn van het Bluetooth apparaat.

Verleng de waarschuwingstoon om zo voldoende tijd te geven voor het starten van het streamen.

Beëindig de actieve Bluetooth verbinding en probeer dan om te pairen via Bluetooth met het nieuwe apparaat.

Regulaties

Aanwijzingen



Aanwijzingen m.b.t. elektronische apparaten.

Aanwijzingen verwijderen

Afgeschreven of en onbruikbare hoortoestellen kunt u het beste bij uw audicien inleveren of bij een geautoriseerde inzamelplaats voor elektronische apparatuur.

Deze mogen niet samen met het huisvuil worden aangeboden. Raadpleeg hiervoor de regels en verordeningen van uw woonplaats.

Informatie voor het Recycling-Personeel

Dit product bevat een Lithium-Ionen-Polymer-Batterij welke bij de recycling uit het apparaat moet worden gehaald.

- Scheid de beide helften van de behuizing met een kleine schroevendraaier.
- Maak de batterijcontacten los van de printplaat om kortsluiting te vermijden.
- Verwijder de batterij met een vlak mesje uit de behuizing.

Veiligheidsinstructies

De SurfLink Microphone en SurfLink Mini Mobile zijn volledig conform Internationale Elektromagnetische standaarden ontwikkeld. Ondanks alles bestaat de mogelijkheid van interferentie met hoogspanningsleidingen, metaaldetectoren, electromagnetische velden en andere hulpmiddelen en radiosignalen.

Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten. Indien u een MRI- of MRT-Behandlung moet ondergaan, raden wij u dringend af de SurfLink externe microfoon te gebruiken.

Regulaties

Gebruik voor in het vliegtuig

De SurfLink Microphone en Mini Mobile mogen niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan.

Internationaal gebruik

De SurfLink Microphone en draadloze overdracht zijn specifiek voor een land waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in de microfoon zelf.

De batterij is niet verwisselbaar. Probeer u alstublieft niet de batterij uit te nemen of te verwisselen.

FCC/IC Informatie

SurfLink externe Microphone

FCC ID: EOA-CM

IC: 6903A-CM (Model 400)

SurfLink Mini Mobile Adapter

FCC ID: EOA-CMA

IC: 6903A-CMA (Model 500)

FCC-/IC-Aanwijzing

Het toestel komt overeen met Deel 15 van de FCCRegulering en met RSS-210. Deze houden de volgende condities in: (1) Het toestel veroorzaakt geen zware interferenties en (2) het toestel moet interferenties afzwakken of beëindigen, ook wanneer dat leidt tot tijdelijke onbruikbaarheid.

Belangrijk: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor optredende onderbrekingen door radio of TV signalen, die door ongeautoriseerde modificatie van het apparaat optreden.

Regulatorien

De SurfLink Microphone is ontwikkeld onder toezicht van de geldende richtlijnen en correspondeert met de Directive 1999/5/EC. Op onderstaand adres is een kopie van Declaration of Conformity beschikbaar.

Paradigm, Inc.
6600 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN USA

EC REP

Paradigm, Inc. European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom





Fabrikant:

Starkey Laboratories, Inc.
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie, Minnesota MN 55344 USA

Geautoriseerde Europese Vertegenwoordiging:

Starkey Laboratories, Ltd.
William F. Austin House
Bramhall Technology Park
Hazel Grove
Stockport, Cheshire
United Kingdom, SK7 5BX

Starkey Nederland en België:

KIND HOREN
Laan van de leeuw 50
7324 BD Apeldoorn
Telefoon: +31(0)55 360 21 11
info@kindhoren.nl