

Halo™

Made for iPhone®
RIC & AHO

Receiver in canal & AHO



Made for iPhone RIC en AHO en TruLink zijn compatibel met iPhone 6, iPhone 6Plus, iPhone 5s, iPhone 5, iPad Air (4e generatie), iPad Mini met Retina Display, iPad Mini en iPod Touch (5e generatie).



GEBRUIKSAANWIJZING

Over uw hoortoestellen

RIC 13 - Functies, bedieningselementen en identificatie.....	4
AHO 13 - Functies, bedieningselementen en identificatie.....	5

Vorbereiding

Batterijen	6
Batterijen leeg waarschuwingstonen.....	6
In en uitnemen van het hoortoestel.....	9

Gebruik

In-en uitschakelen van de hoortoestellen	13
Bediening en koppeling.....	13
Telefoneren.....	16
Keuze van de hoorprogramma's met de knop (voor AHO)	16

Reiniging en onderhoud van het hoortoestel

Reiniging en onderhoud van uw hoortoestel	17
Verwisselen van de hearclearfilter	17
Service en reparaties.....	20
Problemen oplossen	21

Tips voor betere communicatie

Voor u	22
Voor uw familie en bekenden	23

Algemene voorwaarden en veiligheidsinstructies




Wettelijke aanwijzingen	25
Service en Garantie.....	25

Over uw hoortoestellen


RIC 13 - Functies, bedieningselementen en identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:

1. Hoortoestel
2. Luidsprekerslang
3. Luidspreker/Receiver
4. Microfoon
5. Batterijlade (in-en uitschakelaar)
6. Sportslock
7. Fabrikantnaam en model
8. Kleurmarkering:
ROOD = Rechts
BLAUW = Links
9. Dome (standaard)
10. Kleurmarkering hoortoestel:
ROOD = Rechts
BLAUW = Links
11. Micromould (op maat gemaakt, optioneel)
12. Micromould voor power receiver (op maat gemaakt, optioneel)

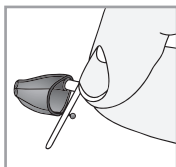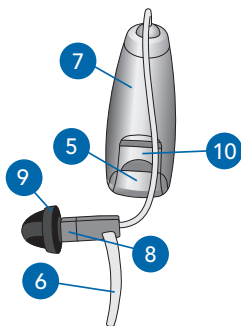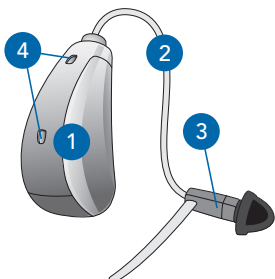

11




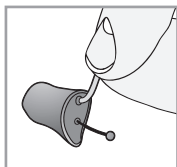


12

AHO 13 - Functies, bedieningselementen en identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:

1. Hoortoestel
2. Hoortoestelhaak
3. Luidspreker
4. Keuzeknop (hoorprogramma's)
5. Batterijlade (in-en uitschakelaar)
Serienummer
6. Zijde herkenning
ROOD = Rechts
BLAUW = Links
7. Fabrikantnaam en model
8. Oorstukje op maat
9. Dome met mircoslang

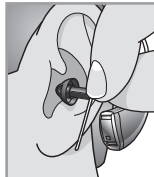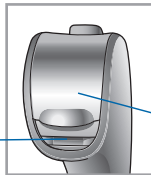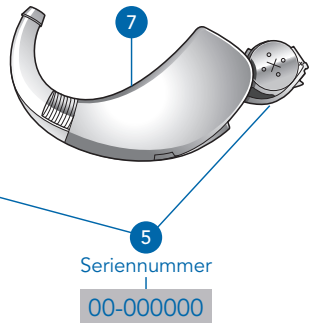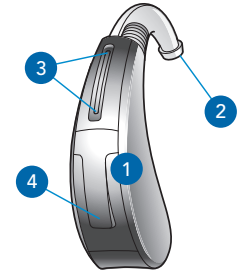

Vorbereiding

Batterijen

Er zijn veel verschillende maten batterijen. Uw audicien kan u adviseren over de juiste maat en de levensduur van de batterij. Het type batterij voor de Starkey HALO RIC 13 en AHO is 13 (oranje)


Plaatsen en wisselen van de batterij:

1. Open de batterijlade aan de onderkant voorzichtig met de vingernagel.
2. Haal de batterij eruit.
3. Haal de sticker van de + kant van de batterij eraf.
4. Haal de sticker van de + kant van de batterij eraf. Plaats het zo in het hoortoestel dat + kant omhoog wijst en de - kant aan de onderkant van de lade zit.
5. Sluit de batterijlade.


Batterij leeg waarschuwingstonen

Een zwakke batterij moet meteen worden omgewisseld. Als de batterij bijna leeg is hoort u een melodie of wordt dit met een spraakboodschap vermeld. Dit betekent niet dat er iets mis is met het hoortoestel. Deze waarschuwing begint wanneer de batterij na ongeveer 5 minuten leegraakt. De waarschuwing om de batterijwissel aan te kondigen wordt in regelmatige intervallen herhaald.


** De tijd tussen de toon en de uitschakeling varieert per omstandigheden per omgeving en de fabrikant.*

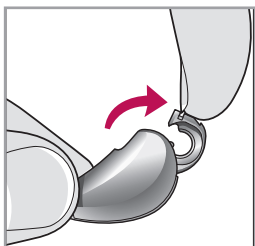


1

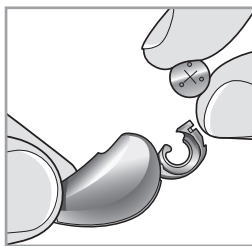


2

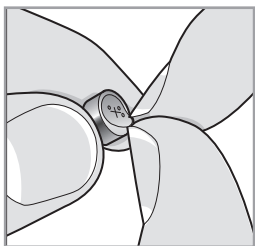

3

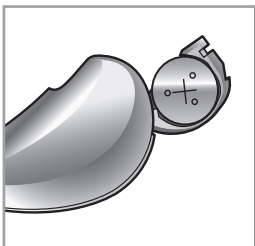

4

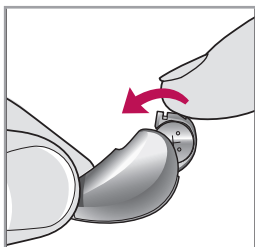






5

Vorbereiding

Belangrijke aanwijzingen

- De levensduur van de batterij wordt niet verlengd als tussentijds het stickertje weer op de batterij wordt geplaatst.
- Bewaar de batterijen op kamertemperatuur, vermijd het bewaren in hete ruimtes of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld in de badkamer). Bewaren in een koele ruimte is niet noodzakelijk.
- Draag batterijen niet los in uw tas of in de portemonnee. Materialen van metaal, zoals munten of sleutels kunnen bij de batterij tot kortsluiting leiden.
- Oude batterijen bevatten mogelijk schadelijke stoffen of zwaarmetalen die de omgeving en gezondheid kunnen schaden. Batterijen worden gerecycled, ze bevatten stoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel. Oude batterijen mogen niet in het huisvuil terecht komen.

Waarschuwing

-  Batterijen veroorzaken schade aan de gezondheid als ze door worden doorgeslikt.
-  Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
-  Wees voorzichtig met het innemen van medicijnen. Batterijen kunnen gemakkelijk worden verwisseld met tabletten.
-  Neem batterijen nooit in de mond, u kunt zich daarin verslikken.
-  Gebruikers worden gevraagd om batterijen bij de winkel of in een batterijenbak bij bijvoorbeeld de supermarkt weg te gooien. U kunt ook de batterijen bij uw audicien afgeven.

Plaatsen en uittomen van uw hoortoestellen



Plaatsen van het toestel met dome/
micromould:

1. Plaats de luidspreker met dome in uw oor en plaats aansluitend het hoortoestel achter het oor.
2. Let er wel op dat de luidspreker met dome zo geplaatst is dat de hoorslang nauw aansluit aan het oor, tegen de huid aan.
3. Leg het hoortoestel achter het oor en als de luidspreker over een sportslock beschikt, plaats deze dan aan de binnenkant van de oorschelp.

Uittomen van het hoortoestel
inclusief de domes:

1. Trek de sportslock uit het oor.
2. Trek het toestel van achter het oor naar voren.
3. Trek de luidspreker voorzichtig bij de gehoorangang naar buiten.

Trek de micromould niet uit het oor door aan het hoortoestel te trekken. Hierdoor kan mogelijk een beschadiging optreden van de elektrische verbinding.

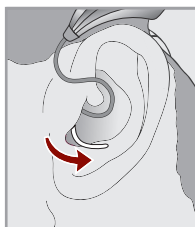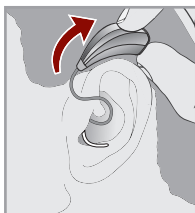

Vorbereiding

Plaatsen en uittomen van uw hoortoestellen

Plaatsen van het oorstukje op maat en de micromould:




Uw hoortoestel is met een individueel voor u gemaakt oorstukje uitgerust. Lees alstublieft hieronder door.

Uw hoortoestel is met een standaard open aanpassing met een dome uitgerust. Lees alstublieft door vanaf bladzijde 13.

1. Pak het slangetje van het oorstukje tussen duim en wijsvinger vast.
2. Draai uw hand iets naar voren en plaats de punt van het oorstukje in de gehoorgang.
3. Draai het oorstukje naar achteren.
4. Druk het oorstukje met uw vinger aan zodat het vast zit.
5. Leg nu het hoortoestel achter het oor zodat de toonbocht op het oor ligt.

Uittomen van het oorstukje op maat en de micromould:




Haal het hoortoestel achter het oor vandaan en trek voorzichtig het oorstukje uit het oor. Als u het oorleltje iets naar onderen trekt kunt u het oorstukje gemakkelijk uit het oor trekken.

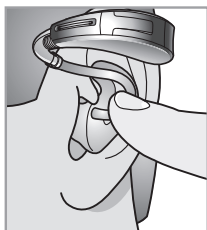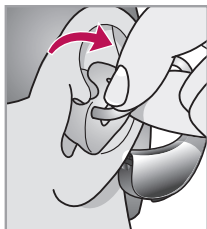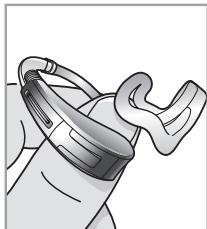

Plaatsen en uittomen van uw hoortoestellen

Plaatsen van het toestel met dome:

1. Plaats de microslang met dome in uw oor en plaats aansluitend het hoortoestel achter het oor.
2. Let er wel op dat de microslang met dome zo geplaatst is dat de hoorslang nauw aansluit aan het oor, tegen de huid aan.
3. Leg het hoortoestel achter het oor en als de microslang over een sportslock beschikt, plaats deze dan aan de binnenkant van de oorschelp.

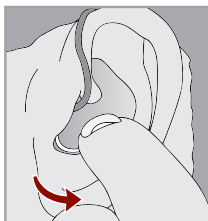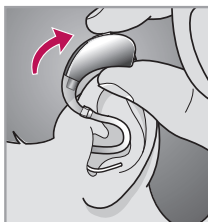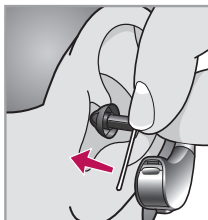

Uittomen van het hoortoestel inclusief de domes:

1. Trek de sportslock uit het oor.
2. Trek het toestel van achter het oor naar voren.
3. Trek de microslang voorzichtig bij de gehooropening naar buiten.

Belangrijke aanwijzingen

- Als het oor eenmaal gewend is dat er iets in zit, kan het licht geïrriteerd raken of kleine drukpunten vertonen. Gaat u in dat geval bij uw audicien langs.
- Mocht er onverhoopt een allergische reactie optreden dan zijn er ook andere materialen voor het oorstukje beschikbaar. Bespreek dit met uw audicien.
- Sterke zwellingen van het oor, een loopoor, overmatige cerumenproductie of andere vreemde reacties moeten medisch worden behandeld.

In-en uitschakelen van de hoortoestellen

Om het hoortoestel in te schakelen plaatst u een batterij en sluit u de batterijlade volledig. Om uw hoortoestel uit te schakelen opent u de batterijlade. Zorg ervoor dat de batterijlade helemaal openstaat zolang u het hoortoestel niet draagt.

Uw audicien kan de inschakelvertraging voor u activeren.

- inschakelmelodie geactiveerd
- inschakelvertraging 7 seconden
- inschakelvertraging 12 seconden

Bediening van uw hoortoestel

Uw Made for Iphone toestel is ontwikkeld om gebruik te maken van een iphone 6, iphone 6Plus, iphone 5s, iphone 5, ipad air (4e generatie), ipad mini met retina display, ipad mini en ipod touch (5e generatie).


Basisvoorwaarden om uw hoortoestel te bedienen met uw iPhone:

- Controleer of Besturingssysteem iOS7.1 of hoger is geïnstalleerd op de iphone.
- Installeer de TRuLink app via de Itunes App store en koppel de iphone met de hoortoestellen (via iOS7.1) (zie volgende hoofdstuk: koppelen van de hoortoestellen).

Eine detaillierte, intuitive Bedienungsanleitung finden Sie, Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing is tevens te vinden bij het openen van de instellingen of bij het icoontje ?.

Uw hoortoestellen koppelen met de iPhone

Om uw hoortoestellen te kunnen bedienen met de iPhone moeten ze eerst worden gekoppeld. Op deze wijze communiceren de hoortoestellen en de iPhone met elkaar. Volg de beschrijving om de hoortoestellen succesvol te koppelen.

1. Toets op het icoon instellingen  van de iPhone.
2. Ga naar Instellingen -algemeen - toegankelijkheid - gehoorapparaatmodus.
3. Als bluetooth nog niet geactiveerd is dient u deze eerst te activeren.
4. In het scherm verschijnt eerst de voornaam en het hoor-toestel (bv Holly Hoortoestel) wanneer de iPhone het hoortoestel voor het eerst herkend heeft.

Is dit niet het geval binnen 5-7 seconden, ga dan naar terug bovenin het linkerscherm en probeer het opnieuw.

5. Toets op de namen van het hoortoestel om de toestellen te koppelen met de iPhone.
6. Er verschijnen twee koppelingsaanvragen, voor elk toestel een. Kies voor Paren om ze op juiste wijze te verbinden. Beide aanvragen kunnen gelijktijdig binnen een paar seconden worden gerealiseerd.
7. De koppeling is nu compleet.

U kunt nu de hoortoestellen met uw iPhone bedienen. De bediening is mogelijk door middel van de iOs functie of de Trulink app. Voor het bedienen zonder Trulink app gebruikt u de home button. Deze moet dan driemaal worden ingedrukt. In het beeldscherm kan het volume en de verschillende hoorprogramma's worden veranderd en de microfoon van de iPhone kan worden gebruikt als externe microfoon.

Start de opname door op Start Live luisteren te drukken en stream de tonen via de iPhone direct naar de hoortoestellen. Richt de iPhone zoveel mogelijk op de geluidsbron. Voor de beste geluidsoverdracht moet de iPhone zo dicht mogelijk bij het geluidssignaal worden geplaatst.

Volume rechts/links: U kunt het volume voor links, rechts of beiden door de schuiven over het beeldscherm te „vegen“. De functie R+L maakt het mogelijk de verandering van het volumedirect voor beide hoortoestellen te bewerkstelligen.

Gebruik

Normaal is de naam voor het oorspronkelijk voor u ingestelde programma. Hierin kan elk ander programma in worden gezet. Het programma wordt automatisch geactiveerd wanneer u weer op een locatie komt waar u eerder bent geweest en deze locatie hebt vastgelegd via de TruLink app.

Telefoneren

Uw hoortoestellen zijn ontwikkeld om met de Iphone samen te werken. Oproepen worden automatisch doorgeschakeld naar uw hoortoestellen zodra deze zijn gekoppeld met de Iphone en ingeschakeld zijn. Als de hoortoestellen niet ingeschakeld zijn komen de oproepen via de Iphone binnen. Als u zelf wil bellen wordt gevraagd of u de oproep via de Iphone of via de hoortoestellen wil voeren. Deze vraag verschijnt als de gekoppelde hoortoestellen ingeschakeld zijn.

Keuze van de hoorprogramma's met de knop (voor AHO)

Uw audicien kan voor het AHO model de knop activeren om zelf de programma's met de hand te bedienen. Door kort op de knop te drukken kan er van programma worden gewisseld. Als het rechter en linker oor toestel met het iOS apparaat zijn gekoppeld dan volstaat de druk op de knop voor één zijde. De andere zijde wordt automatisch in het gelijktijdige programma overgezet.

Aanwijzing: Door de TruLink app wordt de werking en de bediening zo optimaal mogelijk .

Periodieke reiniging en onderhoud

Regelmatige reiniging en onderhoud van uw hoortoestellen verlengt de levensduur en voorkomt reparaties. Bij uw audicien kunt u speciaal voor het hoortoesteltype ontwikkelde reinigingsmiddelen kopen.

Bescherm uw hoortoestellen tegen vochtigheid (bijvoorbeeld douchen of zweet) en doe de hoortoestellen uit als u haarlak op spuit. Om schade aan het hoortoestel door vocht te voorkomen raden wij een elektronische droogdoos aan.

Verwisselen van de filters


Er is een filter in het in het oor schaaltype geplaatst. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het toestel vochtig wordt of dat er oorsmeer in het toestel komt. Dit zal namelijk de geluidskwaliteit negatief beïnvloeden. Deze filter dient regelmatig te worden verwisseld. Uw audicien kan dit voor u doen, maar u kunt ook zelf de eenvoudig het filter verwisselen.

Verwijderen van de filter

Steek het staafje met de zijde waar geen nieuw filter op zit in de oude filter. Het staafje staat nu loodrecht op het toestel. Trek dan de oude filter uit het toestel.

Plaatsen van het filter


Steek het staafje met de nieuwe filter in het gaatje van het toestel waar het filterhuls zit. Trek het staafje er met lichte draaibewegingen uit.

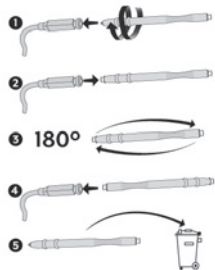


Reiniging en onderhoud

Dagelijks onderhoud voor hoortoestellen met oorstukjes op maat.

1. Haal het oorstukje van het hoortoestel. Dit doet u door de slang van de oorhaak af te trekken.
 - Reinig het oorstukje dagelijks.
 - Gebruik hiervoor een droge doek en verwijder het eventuele oorsmeer (cerumen).
 - Gebruik geen oplossingsmiddelen.
2. Als de slang droog is, schuif deze dan over de toonbocht heen om hem weer vast te zetten.

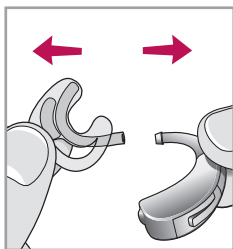

1

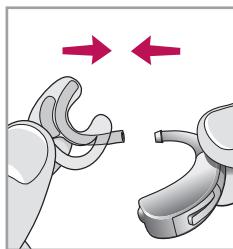


2

Regelmatig kunt u de oorstukjes schoonmaken met reinigstabletten. Deze kunt u bij uw audicien verkrijgen. Uw audicien legt u de werking hiervan graag uit.

Dagelijks onderhoud van de microslang

1. Schroef de microslang van het uiteinde van het hoortoestel af.

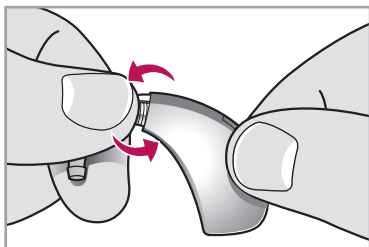

1

2. Steek het draadje door de microslang heen zodat deze er aan de andere kant weer uitkomt.
3. Borstel oorsmeer en andere vuiligheid weg.
4. Reinig de dome met een droge doek of een borsteltje.
5. U kunt de dome met warm water afspoelen. Haal dan de dome van de microslang en laat het daarna goed drogen.

Reiniging en onderhoud

Belangrijke aanwijzingen:

- Open de batterij lade wanneer u het hoortoestel niet gebruikt. Zo kan het vocht erin verdampen. Let er op dat de dome en de microslang droog zijn voordat u alles in elkaar zet.
- Wanneer u het hoortoestel niet gebruikt, haal dan de batterij uit het hoortoestel en leg het in een doosje en op een:
 - droge plek.
 - op een plek waar geen hittebronnen aanwezig zijn.
 - waar u het zo terug kan vinden.
 - buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Service en Reparaties

Hoortoestellen van Starkey zijn betrouwbaar. Als er toch een probleem optreedt, dan kan dat in de regel snel worden opgelost.

Als u na het lezen van deze oplossingen nog steeds problemen heeft met uw hoortoestellen, bezoek dan uw audicien.

De volgende stappen kunt u doorlopen voor het oplossen van problemen:

1. Verwissel de batterij voor een nieuwe.
2. Reinig of verwissel het cerumenfilter.
3. Reinig de microfoon en de luidspreker met het borsteltje.

Aanwijzingen voor probleemoplossing

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAKEN	MOGELIJKE OPLOSSING
De toon is niet helder	de batterij is leeg	de batterij verwisselen
	het volume is te zacht	het volume met de multifunctionel drukknop verhogen
	de dome of het oorstukje zit verstopt	de dome reinigen of verwisselen
De hoor-toestellen piepen	het toestel zit niet goed in het oor	probeer het hoortoestel anders in het oor te plaatsen
	Volume is te hoog	het volume van de multifunctionele drukknop verlagen
	de dome of het oorstukje zit verstopt	de dome verwisselen of cerumenfilter verwisselen
	de batterij is leeg	verwissel de batterij
De toon klinkt vervormd	het volume is te hoog	het volume met de multifunctionele drukknop verlagen
	de batterij is leeg	verwissel de batterij
Het hoortoestel geeft een melodie	de batterij is bijna leeg	verwissel de batterij
De hoor-toestellen doen niets	de toestellen zijn niet ingeschakeld	de toestellen inschakelen
	de batterijlade is niet goed dicht	de batterijlade voorzichtig sluiten
	de batterij is leeg	de batterij verwisselen

Tips voor betere communicatie

Het heeft tijd nodig om te wennen aan nieuwe hoortoestellen. Hoe lang dat duurt is per persoon verschillend en hangt af van veel factoren. Als u voor de eerste keer hoortoestellen draagt, kunnen de volgende tips u helpen met de gewenning.

In de woning

Probeer aan alle geluiden te wennen, zoals geruis en achtergrondgeluiden. Het klinkt misschien allemaal anders. Het heeft enige tijd nodig voordat u aan de toestellen gewend bent. Als u in het begin erg moe wordt van het dragen van de toestellen, gun u zelf dan een pauze. Het doel moet wel zijn dat u ze straks de gehele dag kan dragen.

Gesprek met 1 persoon

Als u met één persoon aan het praten bent, let er dan op dat het geluid om u heen niet te luid is. Ga zo zitten dat u een ander kunt aankijken. Ervaar de spraakklanken, ook al vindt u ze in het begin misschien wat ongewoon. Als uw gehoor eenmaal gewend is aan de klank van de spraak, dan gaat u steeds beter verstaan.

Radio en TV

Nieuwslezers spreken over het algemeen heel duidelijk. Probeer dat goed te volgen. Daarna probeert u andere zenders te volgen. Is het moeilijk om de radio of tv te verstaan, dan informeert uw audicien u graag over de Starkey SurfLinkserie.

Situaties in gezelschap

Bij het praten in gezelschap, bijvoorbeeld in een restaurant, zijn er veel omgevingsgeluiden. Concentreer u dan op vooral op de persoon waar u mee praat. Als u een woord niet verstaat, vraagt u dan of degene het woord wil herhalen.

Gebruik van de ringleidingstand in kerk, theater of bioscoop

In openbare gebouwen, zoals in de kerk, theater of bioscopen is vaak een ringleiding aanwezig. Deze zendt frequenties over magnetische velden uit die via de ringleidingstand in uw hoortoestellen kunnen worden opgepakt, zonder dat er stoorgeluiden aan te pas komen. Vaak wordt bij de informatiebalie aangegeven dat er ringleiding aanwezig is. Vraag in de betreffende gelegenheid en bij uw audicien om meer informatie.

Algemene veiligheidsinstructies

Veiligheidsaanwijzingen

Bescherm uw hoortoestel tegen vocht, water, hitte en mechanische krachten zoals stoten of vallen. Let ook op verontreinigingen tijdens het gebruik van haarlak. Stel uw hoortoestellen in geen geval bloot aan hitte of electro-magnetische straling van welke aard dan ook (bijvoorbeeld röntgenstraling). Dit kan de werking van de hoortoestellen negatief beïnvloeden. Bij het gebruik van mobiele telefoons of radiobestuurde apparaten in de buurt van zendmasten kunnen mogelijk storingen voorkomen. Gebruik uw hoortoestellen niet op een plaats waar explosiegevaar is aangegeven. Wanneer u uw hoortoestellen langere tijd niet draagt, verwijder dan de batterij om de levensduur ervan te vergroten, leeglopen te verhinderen en corrosie van de batterijcontacten te vermijden. Hoortoestelbatterijen zijn niet oplaadbaar. Hoorprogramma's met een digitale richtmicrofoon reduceren met name achtergrondgeluiden. Buiten op straat kunnen mogelijk belangrijke waarschuwingssignalen van achter naderende auto's onderdrukt worden. Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten.

De hoortoestellen functioneren onder de volgende omstandigheden qua temperatuur en vochtigheid. :-40 graden °C tot +60 graden °C en 10% tot 95% rH. Ze zijn ontwikkeld om onder extreme koude en hitte te weerstaan.

Gebruik voor in het vliegtuig

De draadloze ear to ear instellingen mogen niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk wordt toegestaan. Uw audicien kan een apart vliegtuigprogramma activeren zodat de draadloze instellingen gedeactiveerd worden. In dat programma kunnen de hoortoestellen echter onderling niet communiceren.

Aanwijzingen voor het weggooien van Electronische apparaten

Geef onbruikbare hoortoestellen aan uw audicien of aan een andere instelling waar u elektrische apparaten verantwoord kunt achterlaten.

Hoortoestellen bevatten electronische onderdelen die niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid.



CE
0086
0673


Service en garantie

Starkey biedt twee jaar garantie op uw hoortoestellen. Deze garantie kan mogelijk worden verlengd tot vijf jaar indien dit door de zorgverzekeraar wordt voorgeschreven. Tijdens de garantietijd worden toestellen gerepareerd of vervangen indien deze defect zijn door materiaal - of fabrieksfouten. Vervangen toestellen of onderdelen worden eigendom van Starkey. Deze garantieservice betekent niet dat de garantietijd opnieuw zal ingaan of zal worden verlengd. Uitgesloten zijn schade welke door ondeskundig gebruik of eigen schuld ontstaan. De fabrieksgarantie vervalt wanneer een reparatie door een niet door Starkey geautoriseerde derde wordt verricht.

Hoortoestellen draagt u vele uren per dag. Om de werking van de toestellen zeker te stellen, raden wij u aan om minimaal ieder jaar de toestellen door uw audicien te laten controleren. Ook uw gehoor zal regelmatig gecheckt moeten worden zodat uw hoortoestellen altijd de optimale instelling hebben. Dit garandeert de best mogelijke kwaliteit van horen in elke situatie. Wij wensen u vele jaren veel plezier met uw Starkey hoortoestellen en danken u nogmaals voor het vertrouwen in onze producten.

„Made for iPad“, „Made for iPod“ en „Made for iPhone“ betekent dat dit een elektronisch accessoire is dat speciaal ontworpen is voor aansluiting op de iPod, de iPhone en de iPad en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatie- en kwaliteitsnormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de naleving van zekerheids- en wettelijke normen. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad invloed kan hebben op de prestaties van de draadloze communicatie.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is gedeponeerd merk van Apple Inc.

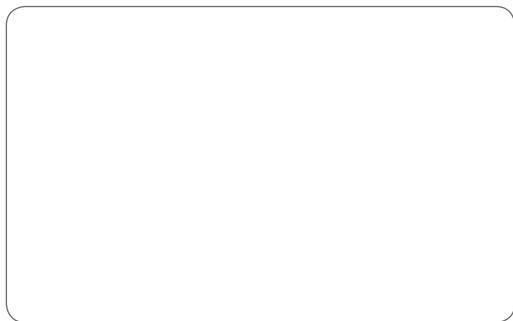

Hearing Is Our Concern™

www.starkey.nl
www.starkey.be



Fabrikant:

Starkey Laboratories, Inc.
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

Starkey Nederland en België:

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7324 BD APELDOORN
Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@Starkey.nl